


	DRIVE-IN 	
Bedienungsanleitung inkl. Wartung, Überholung und Recycling	Rampe	Doc: BRU-DI DE-0014-1.0 Date of issue: 2022-01-24 Date of Approval: 2021-05-21
Letzter Änderungsverlauf:		
Art.Nr DI1040, DI1080, DI1120, DI2080, DI2125  7350066094004, 7350066094011, 7350066094028, 7350066094035, 7350066094042		
Dies ist ein Medizinprodukt der Klasse I. Die Produkte sind CE-gekennzeichnet gemäß MDR 2017/745. Die Kvistberga Group AB hält sich an geltende Arbeits- und Umweltvorschriften. Für Produkt- oder Kundensupport kontaktieren Sie uns bitte unter Kvistberga Group AB. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung einschließlich der Warnhinweise und machen Sie sich vor der Verwendung vollständig mit dem Produkt vertraut. PDF-Versionen zum Herunterladen der Gebrauchsanweisung sind auf unserer Website www.kvistberga.se verfügbar. Inhaltliche Änderungen dieser Gebrauchsanweisung behalten wir uns vor.		
Maximale Last: 250-300kg 	Garantie: 2 Jahre Diese Garantie schließt keine Bedingungen ein, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder unzureichende Wartung gemäß dieser Gebrauchsanweisung entstehen .	



Eine sichere Verwendung dieses Produkts wird erreicht, indem die Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen wird, bevor das Produkt in Gebrauch genommen wird.

Kvistberga Group AB | Lancashirevägen 5C | 735 60 RAMNÄS Sweden

 +46-21-661 00

info@kvistberga.se | www.kvistberga.se

Verwendungszweck

Rampen sind für den Transport oder das Bewegen von behinderten Menschen in einem Rollstuhl (manuell oder elektrisch), nur Rollstühlen, Rollatoren usw. bestimmt. Rampen ermöglichen die Bewegung auf Höhenunterschieden wie Treppen und Schwellen mit oder ohne Unterstützung durch einen Assistenten. Die Rampen können sowohl im Außen- als auch im Innenbereich verwendet werden.



Sicherheit

- Verwenden Sie Rampen der Kvistberga Group NICHT für etwas anderes als den Personentransfer.
- Überprüfen Sie die Rampe regelmäßig und stellen Sie sicher, dass keine Beschädigungen oder Verschleiß vorhanden sind.
- Die Rampen dürfen nur so verwendet werden, wie es in dieser Betriebsanleitung beschrieben ist; jede andere Verwendung ist untersagt.
- Die Rampen dürfen in keiner Weise von ihrem ursprünglichen Design modifiziert oder verändert werden, jede Modifikation oder Änderung bedeutet, dass das Produkt nicht mehr CE-gekennzeichnet ist und die Verantwortung für das Produkt vollständig auf die Person übergeht, die die Änderung vorgenommen hat.

Installation und vor dem ersten Gebrauch

Stellen Sie sicher, dass die Rampe während des Transports nicht beschädigt wurde. Bei sichtbaren Schäden am Produkt oder der Verpackung sind diese unverzüglich dem Fahrer zu melden. Wenden Sie sich zur Beurteilung des Schadens an Kvistberga Group AB oder Ihren Händler. Das Produkt darf nicht verwendet werden, bis der Schaden repariert wurde oder Kvistberga entschieden hat, dass das Produkt noch sicher verwendet werden kann.

Material

Stranggepresstes Aluminium, Endbeschläge aus Kunststoff und Befestigungsbeschläge aus Stahl (Schraube und Mutter).

Lagerung

Bewahren Sie die Rampen drinnen auf und halten Sie sie sauber. Lagern Sie die Rampen nicht bei Temperaturen über 70 °C, da dies die Kunststoffbeschläge beschädigen kann.

Überholung

Die Rampen müssen von Schmutz und Schnee sauber gehalten werden, damit die Haftung auf der Fahrfläche erhalten bleibt. Die Rampen können mit allen auf dem Markt bekannten Reinigungsmitteln gereinigt und bei Bedarf vorteilhaft mit Hochdruckwäsche gewaschen werden. Bei Systemrampen müssen Stützfüße, Geländer, Gelenke und Schrauben einmal jährlich überprüft werden. Diese Überprüfung muss nicht von einem Fachmann durchgeführt werden.

Recycling

Die Rampen sind recycelbar.

Trennen Sie Metall von Kunststoff und geben Sie es bei der nächsten Recyclingstation ab.

Im Schadensfall oder Zwischenfall

Im Falle eines Schadens oder Zwischenfalls muss dies unverzüglich der Kvistberga Group AB gemeldet werden. Im Falle eines schwerwiegenden Vorfalls muss dieser auch der Medizinprodukteagentur gemeldet werden. Wenn der Vorfall nicht schwerwiegend ist, aber häufig und ständig wiederkehrt, ist eine Benachrichtigung der Kvistberga Group AB und der Arzneimittelbehörde erforderlich.


Montage einzelner Rampen

Positionieren Sie die Rampe mit der abgewinkelten Fläche auf der oberen Ebene gemäß dem Bild unten und fixieren Sie den unteren Teil, wenn möglich, um ein Verrutschen zu vermeiden.



Montage zweiteiliger Rampen

Platzieren Sie die Rampe mit dem klappbaren Rampenteil auf der oberen Ebene gemäß dem Bild unten und fixieren Sie das untere Teil wenn möglich, um ein Verrutschen zu vermeiden. Stellen Sie die Schrauben so ein, dass Sie die niedrigste Neigung wie möglich erhalten.

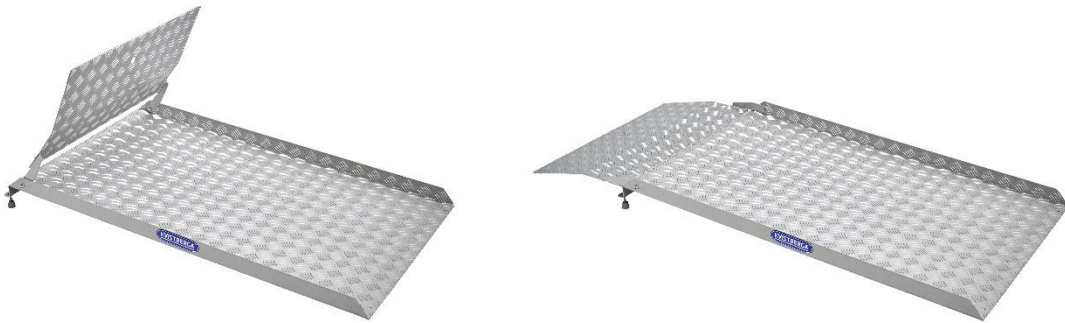

Maximale Belastung siehe Aufkleber auf jeder Rampe!



Kvistberga Group AB | Lancashirevägen 5C | 735 60 RAMNÄS Sweden

+46-21-661 00

info@kvistberga.se | www.kvistberga.se