

	DRIVE-IN 	 
BRUKSANVISNING inkl. info om skötsel, rekonditionering och återvinning	Ramp	Dok: BRU-DI SV-0005-2.0 Ändrad: 2021-11-23 Giltig från: 2021-05-21
Ändring från tidigare version: Nya bilder inlagda		
Art nr DI1040, DI1080, DI1120, DI2080, DI2125  7350066094004, 7350066094011, 7350066094028, 7350066094035, 7350066094042		
<p>Det här är en medicinteknisk produkt, Klass I. De är CE-märkta i enlighet med MDR 2017/745. Kvistberga Group AB följer gällande arbets- och miljölagstiftning.</p> <p>Vid frågor gällande din produkt eller om något oförutsett inträffat är du välkomna att kontakta oss på Kvistberga Group AB.</p> <p>Läs noga igenom bruksanvisningen och ev. varningstexter innan du använder produkten. PDF-versioner av våra bruksanvisningar går att hitta på vår hemsida, www.kvistberga.se.</p> <p>Vi förbehåller oss rätten för ändringar i denna Bruksanvisning och dess innehåll.</p>		
Max belastning: 250 -300 kg 	Garanti: 2 år Skador som uppstår på grund av oaksamhet som att rampen inte hanterats i enlighet med denna bruksanvisning omfattas ej av garantin.	



Tillräcklig kompetens för att säkert kunna använda denna produkt uppnås genom att noga läsa igenom denna bruks- och skötselanvisning innan produkten tas i bruk

Användning

Ramper är avsedda att användas vid transport/förflyttning av funktionsnedsatta personer sittandes i rullstol (manuella eller elektriska), enbart rullstolar, rollatorer etc. Ramper möjliggör förflyttning vid nivåskillnader såsom exempelvis trappor och trösklar med eller utan hjälp från assistent. Ramperna kan användas såväl utomhus som inomhus.

Säkerhet



- Använd **INTE** ramper från Kvistberga Group till någonting annat än till personförflyttning.
- Kontrollera rampen regelbundet och säkerställ att det inte finns några skador eller förslitningar.
- Ramperna får endast användas/monteras på det viset som beskrivs i den här bruksanvisningen, all annan användning är förbjuden.
- Ramperna får inte på något vis modifieras eller ändras från sitt ursprungliga utförande, all modifiering/ändring medför att produkten inte längre är CE-märkt och ansvaret för produkten övergår helt och hållet till den som utfört ändringen.

Installation och innan första användning

Kontrollera att inga skador har uppstått på rampen under transporten. Vid synbar skada på produkten eller emballaget ska detta omedelbart anmälas till chauffören. För bedömning av skadan kontakta Kvistberga Group AB alternativt din återförsäljare. Produkten får inte användas förrän skadan reparerats alternativt om Kvistberga bedömt att produkten ändå är säker att användas.

Material

Strängpressad aluminium, ändbeslag i plast och fästbeslag i stål (skruv o mutter).

Lagring

Lagra ramperna inomhus och håll dem rena. Lagra inte ramperna i temperaturer över 70°C då detta kan skada plastbeslagen.

Rekonditionering

Ramperna ska hållas rena från smuts och snö så att greppet i åkytan bibehålls. Ramperna kan rengöras med alla på marknaden kända rengöringsmedel och kan med fördel tvättas med högtryckstvätt vid behov.

Stödben, räcken, skarvar och skruvar kontrolleras löpande 1 gång/år. Vid behov, justera stödben och dra åt skruvar. Denna kontroll/justering behöver ej göras av fackman.

Återvinning

Ramperna är återvinningsbara.



Separera metall från plast och lämna till närmaste återvinningsstation.

Vid skada eller tillbud

Vid skada eller tillbud ska detta omedelbart meddelas oss. Vid allvarigt tillbud ska detta också rapporteras till Läkemedelsverket. Om tillbudet inte är allvarligt men frekvent och ständigt återkommande ska även detta meddelas oss och rapporteras till Läkemedelsverket.


Installation av single ramp

Placera rampen med den vinklade ytan på den övre nivån och fixera den nedre delen av rampen, om möjligt, för att undvika oönskad förflyttning.



Installation av 2-delade ramper

Placera rampen med den vikbara delen på den övre nivån och fixera den nedre delen, om möjligt, för att undvika oönskad förflyttning. Justera ställskruvorna för att få en så flack lutning som möjligt.

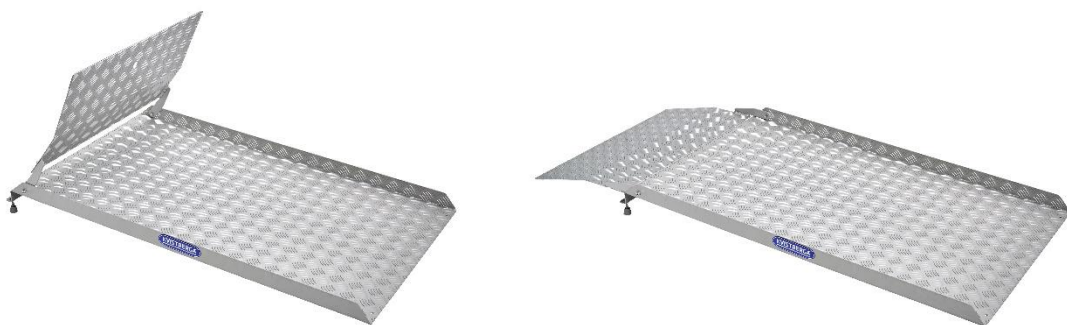

Max belastning, se märkning på rampen!

