

	QUICKRAMPS	
BRUKSANVISNING inkl. skötsel, rekonditionering och återvinning	Tröskelramper i mjuk plast	Dok: KVB-BR-QR-SV Ändrad: 2022-05-25 Giltig från: 2021-05-21
Ändring från tidigare version: Logga för producent tillagd		
Art nr Qramp 4, Qramp 6, Qramp 8, Qramp 10, Qramp 12, Qramp 14, Qramp 16, Qramp 18, Qramp 20, Qramp 24, Qramp 28, Qramp 32, Qramp 36, Qramp 40, Qramp 44, Qramp 48, Qramp 52, Qramp 56, Qramp 60 Qpad-1, Qpad-2, Qpad-4, Qpad-25, Qpad-100, Qtape-1, Qtape-2, Qtape-4, Qtape-25, Qtape-100  5708066DK25276183MDRHT		
Vid frågor gällande din produkt eller om något oförutsett inträffat är du välkomna att kontakta oss på Kvistberga Group AB. Läs noga igenom bruksanvisningen och ev. varningstexter innan du använder produkten. PDF-versioner av våra bruksanvisningar går att hitta på vår hemsida, www.kvistberga.se . Vi förbehåller oss rätten för ändringar i denna manual och dess innehåll.		
Max belastning: 1000 kg 	Garanti: 2 år Skador som uppstår på grund av oaktsamhet som att rampen inte hanterats i enlighet med denna bruksanvisning omfattas ej av garantin.	

Tillräcklig kompetens för att säkert kunna använda denna produkt uppnås genom att noga läsa igenom denna bruks- och skötselanvisning innan produkten tas i bruk

Användning

Ramper är avsedda att användas vid transport/förflyttning av funktionsnedsatta personer sittandes i rullstol (manuella eller elektriska), enbart rullstolar, rollatorer etc. Ramper möjliggör förflyttning vid nivåskillnader såsom exempelvis trappor och trösklar med eller utan hjälp från assistent. Ramperna kan användas såväl utomhus som inomhus.



Använd inte ramper från Kvistberga Group till någonting annat än till personförflyttning.

Kontrollera rampen regelbundet och säkerställ att det inte finns några skador eller förslitningar.

Kontrollera att rampen ligger rätt placerad vid påkörning och att ingen glipa mellan rampen och tröskeln finns. Anpassa hastigheten över rampen så att passage kan ske på ett säkert sätt.

Installation och innan första användning

Kontrollera att inga skador har uppstått på rampen under transporten. Vid synbar skada på produkten eller emballaget ska detta omedelbart anmälas till chauffören. För bedömning av skadan kontakta Kvistberga Group AB alternativt din återförsäljare. Produkten får inte användas förrän skadan reparerats alternativt om Kvistberga bedömt att produkten ändå är säker att användas.

Material

PELD plast

Lagring

Lagra ramperna inomhus och håll dem rena.

Rekonditionering

Ramperna kan rengöras med alla på marknaden kända rengöringsmedel och kan med fördel tvättas med högtryckstvätt vid behov. Ramperna behöver inte någon löpande underhåll. Vid behov kan fästmaterialen bytas ut.

Återvinning

Ramperna är återvinningsbara.



Lämnas till retur för plastmaterial på återvinningen.

Det går också bra att returnera överblivet material till oss så ser vi till att materialet återvinns till 100% och blir nya ramper.

Instruktionsvideo

Med nedanstående länk på youtube kommer man till Kvistbergas sida med instruktionsfilmer.

<https://www.youtube.com/channel/UCoITE5pUD4dS51TUshilZwg/videos>

INSTALLATION

Höjdmätning och val av ramp

Börja med att mäta hur hög tröskeln är. Här kan du med fördel använda vår Ramp-o-meter men ett måttband eller tumstock går såklart också bra. Välj en ramphöjd som är exakt som tröskeln eller närmast under.

Anpassning av rampens bredd med mattkniv

Vi rekommenderar att du använder skyddshandskar

1. Mät hur lång rampen behöver vara.
2. Placera rampen på ett stabilt underlag.
3. Märk ut vart snittet ska vara med en märkpenna, använd vinkelhake eller ramp-o-metern som mothåll.
4. Kontrollera att knivbladet är vasst, om inte, byt knivblad för enklast kapning.
5. Gör 3–5 hårda snitt vid markering.
6. Lägg den kortare delen av rampen utanför underlaget och om möjligt spänn fast rampen.
7. Bryt kraftfullt vid snittet så att snittytan öppnar upp sig.
8. Snitta med kniven upprepade gånger i den öppna ytan samtidigt som du bryter. Fortsätt tills du är helt igenom. Det kan behövas ett flertal snitt beroende på rampens tjocklek. Gör hellre fler mjuka snitt än få hårda. Det underlättar kapningen. ⚠

Anpassning av rampens bredd sticksåg


1. Använd ett sågblad anpassat till plast.
2. Följ instruktionerna ovan enligt punkt 1–3, fortsätt sedan till punkt 6 och såga vid din markering med sticksågen från rampens tjockaste del till den tunnaste.



Montering av ramp med Quicktejp



Se till att underlaget som rampen ska monteras på är rent och torrt. Ta minst 3 Tejpremsor till en ramp på 75 cm. Ta bort skyddsplasten på tejpens ena sida och tryck fast tejpens på angivet ställe på rampen. Gnugga på tejpens undersida för att skapa friktion och värme som gör att tejpens fäster extra bra. Placera rampen på plats och ställ dig på rampen i ca 30 sekunder.

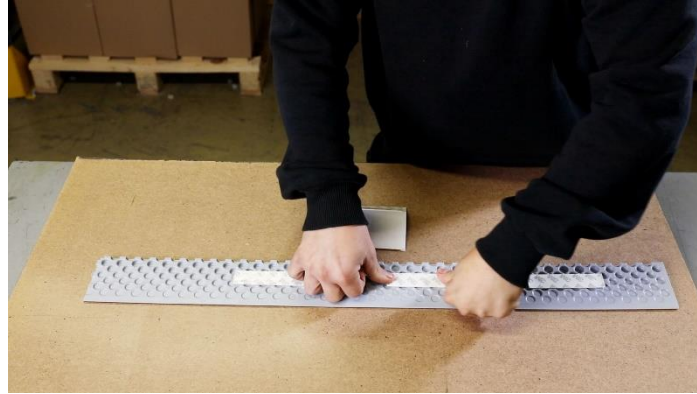

Montering av ramp med Quickpads



1. Se till att underlaget som rampen ska monteras på är rent och torrt.
2. Placera rampen på den plats du vill ha den.
3. På rampen ovasida finns pilar som visar vart du ska placera Quickpadsen. Gör en liten markering på tröskeln vid varje pil (3). Lyft sedan bort rampen så att du kommer åt att montera dit padsen.
4. Placera Quickpadsen centrerat vid din markering (4).
5. Tag bort skyddsplasten och montera Quickpadsen på golvet vid markeringen (5)
6. Lägga dit rampen så att padsen passar in i de avlånga hålen under rampen.



Upp till 75 cm lång ramp – använd minimum 2 Quickpads per ramp

75-100 cm lång ramp – använd minimum 3 Quickpads per ramp

Demontering av ramp

Quicktejp

Tag en lång kniv och skjut in den mellan rampen och golvet med eggen riktad åt höger eller vänster. För kniven parallellt med golvet och kapa av tejp. Lyft bort rampen. Ta tummen och rulla bort tejp som sitter kvar mot golvet. Rengör vid behov med ett mildt rengöringsmedel.

Quickpads

Lyft rampen rakt upp så att den släpper från padsen.

Ta en skruvmejsel eller en kniv och separera plastdelen från tejp på padseb.

Ta tummen och rulla bort tejp som sitter kvar mot golvet.

Rengör vid behov med ett mildt rengöringsmedel.

Producent:
Excellent Systems A/S • Møllevvej 2 • DK - 8544 Mørke
info@ex-as.com + 45 8637 7133

