

	QUICKRAMPS 	
BRUKSANVISNING inkl. skötsel, rekonditionering och återvinning	Tröskelramper i mjuk plast	BRU-Qramp-0113-2 Ändrad: 2025-02-07 Giltig från: 2021-05-21
Ändring från tidigare version: Ny beskrivning av hur kapningen går till, ändrade bilder som visar de nya kapsnitten. Adderat text om klass 1 produkter och även ändrat beskrivningen av hur fästmaterialen tas bort.		
Medicintekniskt hjälpmedel , klass 1 CE-märkt enligt MDR 2017/745/EU Art nr Qramp 4, Qramp 6, Qramp 8, Qramp 10, Qramp 12, Qramp 14, Qramp 16, Qramp 18, Qramp 20, Qramp 24, Qramp 28, Qramp 32, Qramp 36, Qramp 40, Qramp 44, Qramp 48, Qramp 52, Qramp 56, Qramp 60 Qpad-1, Qpad-2, Qpad-4, Qpad-25, Qpad-100, Qtape-1, Qtape-2, Qtape-4, Qtape-25, Qtape-100  5708066DK25276183MDRHT		
Vid frågor gällande din produkt eller om något oförutsett inträffat är du välkomna att kontakta oss på Kvistberga Group AB. Läs noga igenom bruksanvisningen och ev. varningstexter innan du använder produkten. PDF-versioner av våra bruksanvisningar går att hitta på vår hemsida, www.kvistberga.se . Vi förbehåller oss rätten för ändringar i denna manual och dess innehåll.		
Max belastning: 1000 kg 	Garanti: 2 år Skador som uppstår på grund av oaktsamhet som att rampen inte hanterats i enlighet med denna bruksanvisning omfattas ej av garantin.	

Tillräcklig kompetens för att säkert kunna använda denna produkt uppnås genom att noga läsa igenom denna bruks- och skötselanvisning innan produkten tas i bruk



Avsedd användning

Med avsett syfte som Medical Device för att utjämna höjdskillnader och underlätta passager för personer med gångsvårigheter genom att jämna ut höjdhinder som trösklar, trappsteg som leder in i ett rum eller en byggnad - Alla modeller är klass I-produkter. Produkten kan användas både inom- och utomhus.



Använd inte ramper från Kvistberga Group till någonting annat än till personförflyttning.

Kontrollera rampen regelbundet och säkerställ att det inte finns några skador eller förslitningar.

Kontrollera att rampen ligger rätt placerad vid påkörning och att ingen glipa mellan rampen och tröskeln finns. Anpassa hastigheten över rampen så att passage kan ske på ett säkert sätt.

Installation och innan första användning

Kontrollera att inga skador har uppstått på rampen under transporten. Vid synbar skada på produkten eller emballaget ska detta omedelbart anmälas till chauffören. För bedömning av skadan kontakta Kvistberga Group AB alternativt din återförsäljare. Produkten får inte användas förrän skadan reparerats alternativt om Kvistberga bedömt att produkten ändå är säker att användas.

Material

PELD plast. Giftfritt, luktfritt och 100% återvinningsbart.

Skötsel

Ramperna kan rengöras med alla på marknaden kända rengöringsmedel och kan med fördel tvättas med högtryckstvätt vid behov. Ramperna behöver inte något löpande underhåll. Vid behov kan fästmaterialen bytas ut.

Återvinning

Ramperna är 100% återvinningsbara.



Lämnas till retur för plastmaterial på återvinningen.

Det går också bra att returnera överblivet material till oss så ser vi till att materialet återvinns till och blir nya ramper.

Instruktionsvideo

Med nedanstående länk på Youtube kommer man till Kvistbergas sida med instruktionsfilmer.

https://youtube.com/@kvistbergagroupab8331?si=1pAY_YqHXynpD1YU

Val av ramp

Höjdmätning och val av ramp

Börja med att mäta hur hög din tröskeln är. Här kan du med fördel använda vår Ramp-o-meter men ett måttband eller tumstock går också bra. Välj sen den ramp som är i exakt lika hög som tröskeln eller närmast under.



Kvistberga Group AB – Lancashirevägen 5c – 735 60 Ramnäs – 021-661 00 – www.kvistberga.se



Producent:
Excellent Systems A/S • Møllevvej 2 • DK - 8544 Mørke
info@ex-as.com + 45 8637 7133

Anpassning av rampens bredd – förkapade ramper 28-60 mm

Ramperna levereras med en bredd på 1000 mm. Du kan enkelt anpassa rampens bredd till din tröskel.

Ramper 28-60 mm levereras med förkapade snitt på de tre vanligast förekommande dörrbredderna. Välj det kapsnitt som passar bäst för din dörr och följ stegen nedan:





NYHET

Ramper 28-60 mm

Levereras med snitt på 720, 820 och 920 mm

Om du behöver justera bredden till annan bredd går det självklart bra. Justera då bredden på motsatt sida från de färdiga snitten.



1. Välj det kapsnitt som passar bäst för din dörr.
2. Skär av rampens bakkant.
3. Bryt ner rampen vid snittet, skär och bryt om vartannat tills du är helt igenom.

Behövs annan bredd än 720, 820 eller 920 mm se nästa avsnitt.



Anpassning av rampen bredd för ramper 4-24 mm och högre ramper som behöver annan bredd än de förkapade snitten



1. Mät och markera vart du ska lägga ditt snitt.
2. Lägg ett eller flera snitt i rampens bakkant
3. Snitta rampens yta med 3-4 snitt. Vinkelhake eller liknande kan användas för att enklare få ett rakt snitt. Följ annars mönstret i rampens åkyta
4. Placera rampen så att den del som ska skäras bort hamnar utanför arbetsytan
5. Bryt sedan nedåt.
6. Gör ett nytt snitt i samma skåra och upprepa brytning och skärning tills du är helt igenom.



Gör hellre fler mjuka snitt än få hårda – det underlättar kapningen


OBS! Om du ska justera bredden på en redan förkapad ramp justera bredden på motsatt sida mot de färdiga snitten, det underlättar när du ska bryta nedåt.

Kvistberga Group AB – Lancashirevägen 5c – 735 60 Ramnäs – 021-661 00 – www.kvistberga.se



Producent:
Excellent Systems A/S • Møllevej 2 • DK - 8544 Mørke
info@ex-as.com + 45 8637 7133

Fastsättning med Quicktejp eller Quickpads


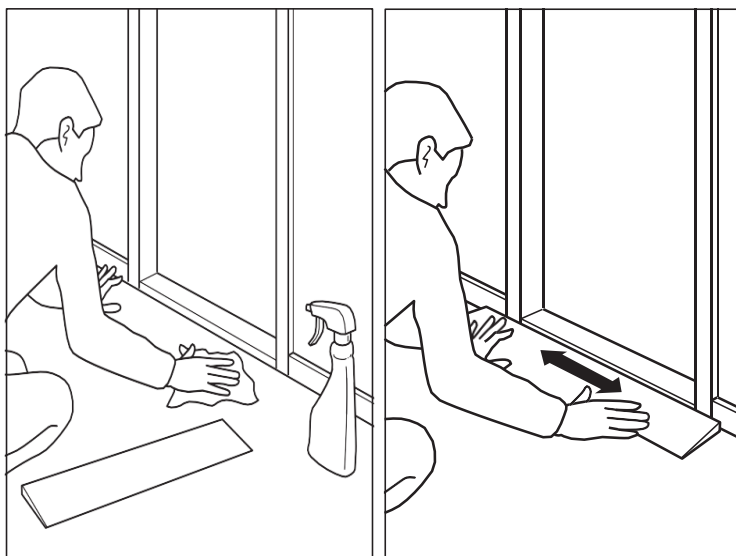


Ramper 4-8 mm

- Se till att ytan är ren och torr.
- Fäst tejpens på angivna platser på rampens undersida.
- Placera rampen vid tröskel. Ställ dig gärna 10 sekunder ovanpå för bästa fäste.

Samtliga ramper kan monteras med tejp men för högre höjder rekommenderar vi Quickpads som underlättar vid tillfällig borttagning av rampen



4-6-8mm

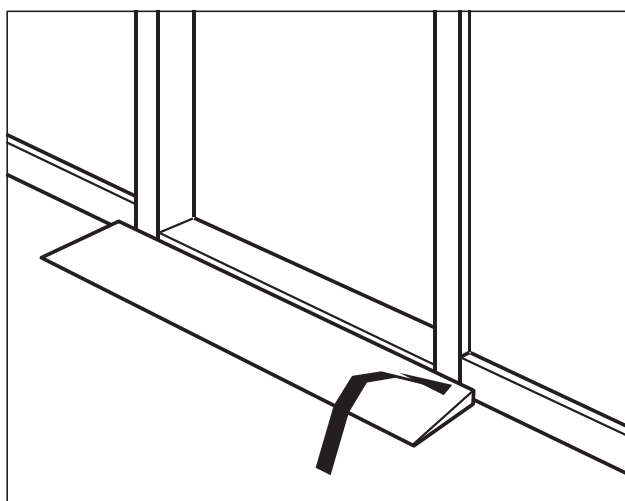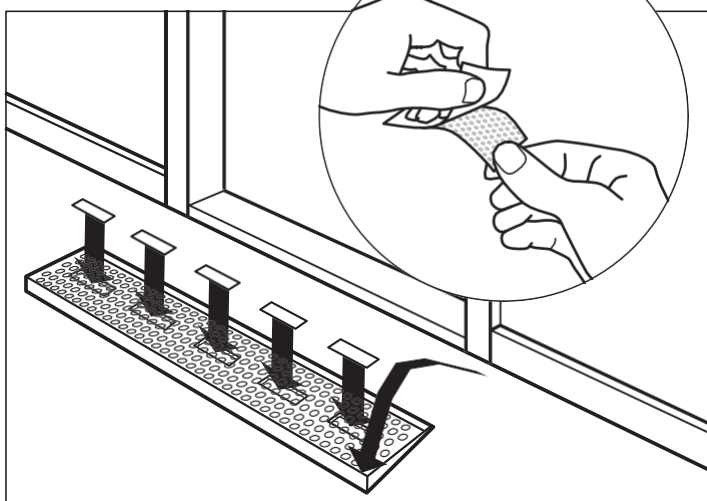

Ramp upp till 75 cm – använd minimum 3 tejprensor per ramp
Ramp 76-100 cm – använd minimum 4 tejprensor per ramp



Fastsättning med Quickpads

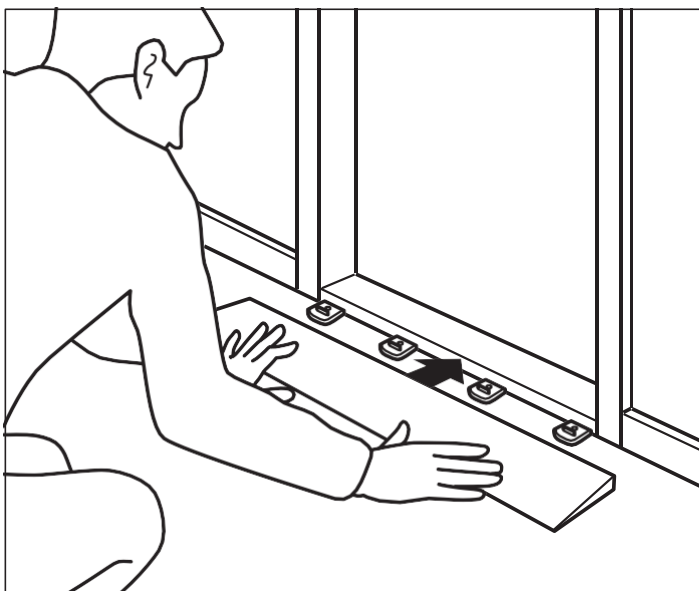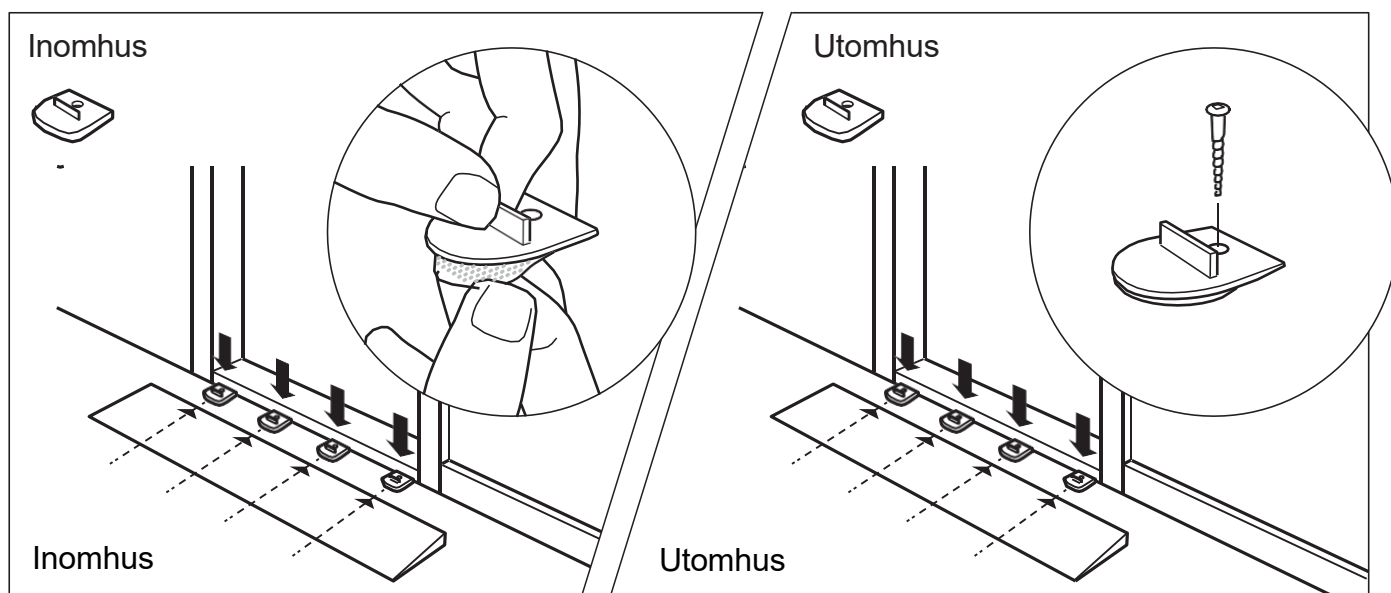

Ramper 10-60 mm

- Se till att ytan är ren och torr.
- Placera padsen vid pilarna på rampens ovansida.
- Placera rampen vid tröskel. Ställ dig gärna 10 sekunder ovanpå för bästa fäste.

Ramp upp till 75 cm – använd minimum 3 Quickpads per ramp

Ramp 76-100 cm – använd minimum 4 Quickpads per ramp




Kombination av ramper

Ta mått på de olika nivåskillnaderna och välj rampmodeller som passar.

Ramperna levereras i fasta höjder men går att kombinera till andra höjder genom att placera ramperna på varandra. Placera alltid den ramp med lägst höjd underst.

För bästa resultat, fäst ramperna med Quicktejp.

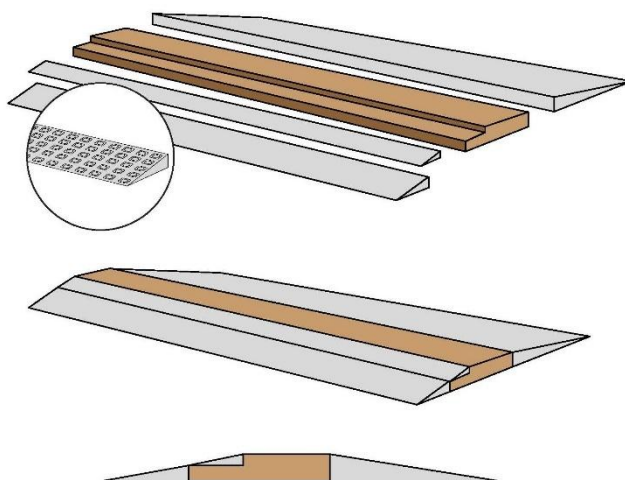


Borttagning av ramp

Quicktejp

1. Avlägsna rampen från golvet.
2. Ta tummen och rulla bort tejpens som sitter kvar mot golvet. Vid behov, rengör ytan med varmt vatten och rengöringsmedel med hjälp av en svamp eller liknande. Behövs extra rengöring använd limborttagningsmedel som är avsedd för aktuell yta.

Quickpads

1. Avlägsna rampen genom att lyfta bort den från padsen.
2. Ta en skruvmejsel eller annat platt verktyg och separera plastdelen från tejpens på padsen.
3. Ta tummen och rulla bort tejpens som sitter kvar mot golvet. Vid behov, rengör ytan med varmt vatten och rengöringsmedel med hjälp av en svamp eller liknande. Behövs extra rengöring använd limborttagningsmedel som är avsedd för aktuell yta.

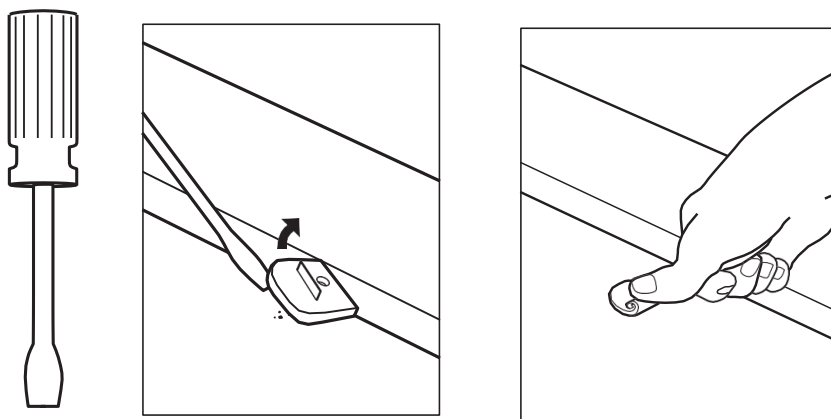

Var en del av vårt viktiga miljöarbete

Vi är väldigt måna om att våra produkter återvinns. Materialet i Quickramps är återvinningsbart om och om igen. Vi, tillsammans med producenten, tar ansvar för att det material som samlas in går direkt tillbaka i produktionen och blir till nya ramper. En process som kan göras om flera gånger. I det fall det är möjligt placerar vi ut särskilda insamlingskärl så att du som kund kan hjälpa till och bidra till vårt hållbarhetsarbete.

Här kan ni se ett exempel på hur ett återvinningskärl kan se ut.



**Tack för att DU hjälper till i vårt viktiga arbete att bevara miljön
och skapa en hållbar produktion!**

Kvistberga Group AB – Lancashirevägen 5c – 735 60 Ramnäs – 021-661 00 – www.kvistberga.se

Producent:
Excellent Systems A/S • Møllevvej 2 • DK - 8544 Mørke
info@ex-as.com + 45 8637 7133

