

	EXCELLENT 	
BRUKSANVISNING inkl. skötsel, rekonditionering och återvinning	Färdigbyggda tröskelramper	BRU-Excellent-0108-3 Ändrad: 2026-01-14 Giltig från: 2022-05-21
Ändring från tidigare version: Förtydligande gällande installation på plant underlag tillagt (sidan 5)		
Medicintekniskt hjälpmedel , klass 1 CE-märkt enligt MDR 2017/745/EU Art nr 12660, 12660-12, 12658, 12654, 12655, 12662, 12664, 12664+, 12756 Samtliga tillbehör och reservdelar  5708066DK25276183MDRHT		
Vid frågor gällande din produkt eller om något oförutsett inträffat är du välkomna att kontakta oss på Kvistberga Group AB. Läs noga igenom bruksanvisningen och ev. varningstexter innan du använder produkten. PDF-versioner av våra bruksanvisningar går att hitta på vår hemsida, www.kvistberga.se . Vi förbehåller oss rätten för ändringar i denna manual och dess innehåll.		
Max belastning: 1000 kg 	Garanti: 2 år Skador som uppstår på grund av oaktsamhet som att rampen inte hanterats i enlighet med denna bruksanvisning omfattas ej av garantin.	

Tillräcklig kompetens för att säkert kunna använda denna produkt uppnås genom att noga läsa igenom denna bruksanvisning innan produkten tas i bruk



Avsedd användning

Med avsett syfte som medicintekniskt hjälpmedel för att utjämna höjdskillnader och underlätta passager för personer med gångsvårigheter genom att jämna ut höjdhinder som trösklar, trappsteg som leder in i ett rum eller en byggnad - Alla modeller är klass I-produkter. Produkten kan användas både inom- och utomhus.



Använd inte ramper från Kvistberga Group till någonting annat än till personförflyttning.

Kontrollera rampen regelbundet och säkerställ att det inte finns några skador eller förslitningar.

Kontrollera att rampen ligger rätt placerad vid påkörning och att ingen glipa mellan rampen och tröskeln finns. Anpassa hastigheten över rampen så att passage kan ske på ett säkert sätt.

Installation och innan första användning

Kontrollera att inga skador har uppstått på rampen under transporten. Vid synbar skada på produkten eller emballaget ska detta omedelbart anmälas till chauffören. För bedömning av skadan kontakta Kvistberga Group AB alternativt din återförsäljare. Produkten får inte användas förrän skadan reparerats alternativt om Kvistberga bedömt att produkten ändå är säker att användas.

Material

PELD plast. Giftfritt, luktfritt och 100% återvinningsbart.

Skötsel

Ramperna kan rengöras med alla på marknaden kända rengöringsmedel och kan med fördel tvättas med högtryckstvätt vid behov. Ramperna behöver inte något löpande underhåll. Vid behov kan fästmaterialen bytas ut.

Återvinning

Ramperna är 100% återvinningsbara.



Lämnas till retur för plastmaterial på återvinningen.

Det går också bra att returnera överblivet material till oss så ser vi till att materialet återvinns till och blir nya ramper.

Instruktionsvideo

Med nedanstående länk på Youtube kommer man till Kvistbergas sida med instruktionsfilmer.

https://youtube.com/@kvistbergagroupab8331?si=1pAY_YqHXynpD1YU

Val av ramp

Höjdmätning och val av ramp

Börja med att mäta hur hög din tröskeln är. Här kan du med fördel använda vår Ramp-o-meter men ett måttband eller tumstock går också bra. Välj sen den ramp som är i exakt lika hög som tröskeln eller närmast under.





Användning av förhöjningsremсор

Börja i förhöjningsremсорs tunna del och räkna upp till rätt höjd som skall användas, se *bild 1*. för varje steg ökar höjden med 2 mm dvs. den tunnaste bygger 2 mm och den tjockaste 16 mm. Vid rätt höjd som skall användas rivs remсорn av, se *bild 2*. Observera att alla remсор som är tunnare än de som skall användas skall sitta kvar ihop med den som skall användas för att det inte skall bli något mellanrum mellan rampen och golvet. Montera därefter remсорn under rampen, se *bild 3*. De överblivna delarna läggs i återvinningen.



Justera bredden på din ramp så här

Behöver du en bredare ramp använder du en breddningssats. Med hjälp av denna kan du bredda rampen med 25 cm. Bestäm åt vilken sida rampen ska breddas, vid behov byt sida på skarvhylsorna, se *bild 4*. Klicka ihop rampen och breddningssatsen, se *bild 5*.

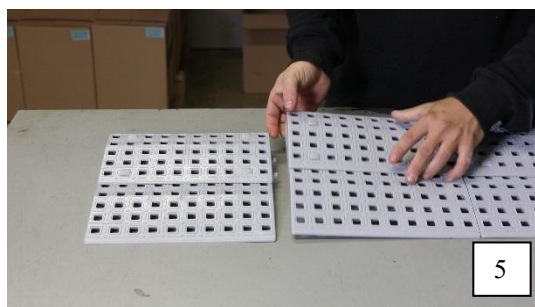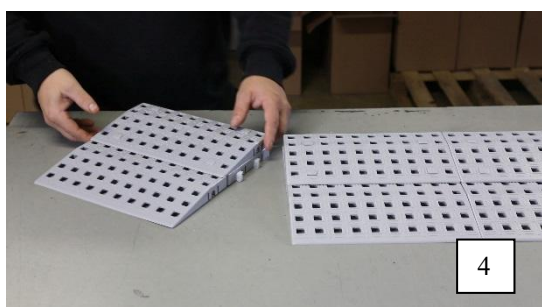

Behövs en ännu bredare ramp rekommenderar vi att den beställs färdigbyggd ifrån oss.





Om rampen är för bred kan du justera bredden genom att kapa bort en del av rampen. Detta görs lättast med en liten handsåg alternativt en elektrisk sticksåg, se *bild 6*. Mät hur lång rampen behöver vara, lägg den på ett stadigt underlag och spänn om möjligt fast den. Om möjligt, välj att såga i ytterkanten mot en hålrad för minsta möjliga motstånd, se *bild 7*. Överblivet material läggs till återvinning.



Montering av hörnmodul

Bestäm vilken sida av rampen hörnet ska vara på, vid behov byt sida på skarvhylsorna, se *bild 8*.

Klicka ihop hörmodulen med rampen, se *bild 9*

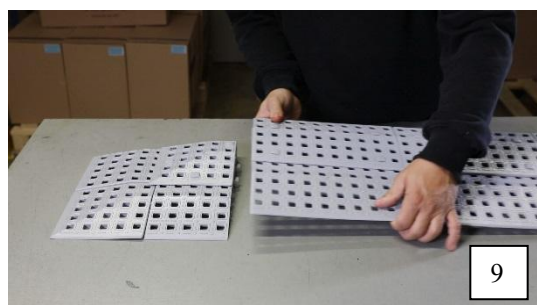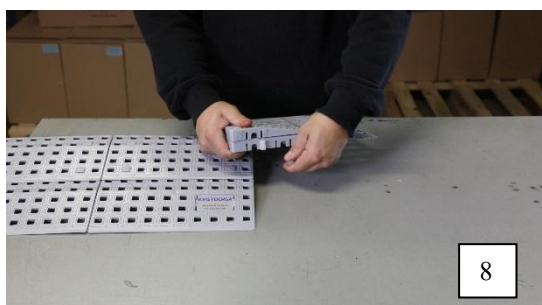


Montering av ramp

Se till att underlaget som rampen skall monteras på är rent och torrt. Ta minst 2 monteringsplattor, se bild, och tryck in dem halvvägs i valfria hål under rampen, se *bild 10*. Vi rekommenderar att du använder hål som sitter så nära tröskeln som möjligt och brett isär. Vid behov kan extra monteringsplattor sättas dit. Ta bort skyddsplasten under monteringsplattan, lägg rampen på plats med monteringsplattorna nedåt. Ställ dig på rampen ca 30 sekunder så att monteringsplattorna trycks upp i hålet på rampen och tejpens fäster mot golvet, se *bild 11*.



Det går nu att lyfta bort rampen vid behov exempelvis för städning. Lyft rampen rakt upp för att komma åt att rengöra under rampen. För att placera tillbaka rampen passa in den i hålen på undersidan av rampen igen och tryck rampen nedåt till ursprungsläget, se bild 12.

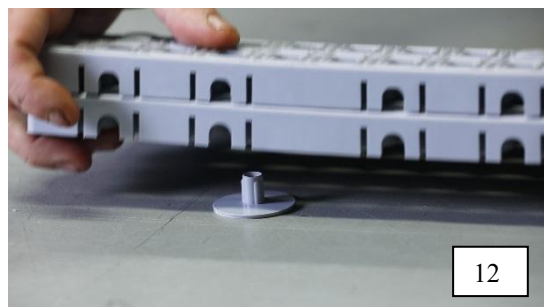

VIKTIG INFORMATION

Vid installation och montering av ramper är det viktigt att underlaget där rampen placeras är plan. Det är extra viktigt om underlaget lutar ifrån tröskeln då detta kan medföra att rampens lutning blir för brant. Det är installatörens ansvar att se till att underlaget är plant innan rampen läggs på plats.



Demontering av ramp

Lyft rampen rakt upp så att den släpper från monteringsplattorna. Ta en skruvmejsel eller en kniv och separera plastdelen från tejpen på monteringsplattorna. Ta tummen och rulla bort tejpen som sitter kvar mot golvet. Rengör vid behov med ett mildt rengöringsmedel.

Var en del av vårt viktiga miljöarbete

Vi är väldigt måna om att våra produkter återvinns. Materialet i Quickramps är återvinningsbart om och om igen. Vi, tillsammans med producenten, tar ansvar för att det material som samlas in går direkt tillbaka i produktionen och blir till nya rampor. En process som kan göras om flera gånger. I det fall det är möjligt placerar vi ut särskilda insamlingskärl så att du som kund kan hjälpa till och bidra till vårt hållbarhetsarbete.

Här kan ni se ett exempel på hur ett återvinningskärl kan se ut.



Tack för att DU hjälper till i vårt viktiga arbete att bevara miljön och skapa en hållbar produktion!

