

	PERFOLIGHT 	
BRUKSANVISNING inkl. info om skötsel, rekonditionering och återvinning	Portabla ramper	BRU-Perfolight-0038 Version 3 Giltig från: 2025-11-27
Ändring från tidigare version: Förtydligande av vikten av att dra ut ramperna till full längd vid användning har lagts till		
Art nr U1, U2, U2/3, U3, V5, V11, V15, V20, V30, E2, E2/3, E3 UDI 7350066092000, 7350066092017, 7350066092024, 7350066092048, 7350066092130, 7350066092079, 7350066092086, 7350066092093, 7350066092116, 7350066092277, 7350066092291, 7350066092314		
Denna produkt är en medicinteknisk produkt, Klass I. De är CE-märkta i enlighet med MDR 2017/745. Kvistberga Group AB följer gällande arbets- och miljölagstiftning. Vid frågor gällande din produkt eller om något oförutsett inträffat är du välkomna att kontakta oss på Kvistberga Group AB. Läs noga igenom bruksanvisningen och ev. varningstexter innan du använder ramperna. PDF-versioner av våra bruks- och skötselanvisningar går att hitta på vår hemsida, www.kvistberga.se. Vi förbehåller oss rätten för ändringar i denna manual och dess innehåll.		
Garanti: 2 år Skador som uppstår på grund av oaksamhet som att rampen inte hanterats i enlighet med denna bruksanvisning omfattas ej av garantin.		
Maximal belastning: Anges med detta tecken tillsammans med viktangivelse på respektive modell 	Rekommenderad maximal höjd: Anges med detta tecken tillsammans med måttangivelse på respektive modell 	



Tillräcklig kompetens för att säkert kunna använda denna produkt uppnås genom att noga läsa igenom denna bruks- och skötselanvisning innan produkten tas i bruk

Användning

Ramper är avsedda att användas vid transport/förflyttning av funktionsnedsatta personer sittandes i rullstol (manuella eller elektriska), enbart rullstolar, rollatorer etc. Ramper möjliggör förflyttning vid nivåskillnader såsom exempelvis trappor och trösklar med eller utan hjälp från assistent. Ramperna kan användas såväl utomhus som inomhus.



Säkerhet

- Använd **INTE** ramper från Kvistberga Group till någonting annat än till personförflyttning.
- Kontrollera rampen regelbundet och säkerställ att det inte finns några skador eller förslitningar.
- Ramperna får endast användas på det viset som beskrivs i den här bruksanvisningen, all annan användning är förbjuden.
- Ramperna får inte på något vis modifieras eller ändras från sitt ursprungliga utförande, all modifiering/ändring medför att produkten inte längre är CE-märkt och ansvaret för produkten övergår helt och hållet till den som utfört ändringen.

Installation och innan första användning

Kontrollera att inga skador har uppstått på rampen under transporten. Vid synbar skada på produkten eller emballaget ska detta omedelbart anmälas till chauffören. För bedömning av skadan kontakta Kvistberga Group AB alternativt din återförsäljare. Produkten får inte användas förrän skadan reparerats alternativt om Kvistberga bedömt att produkten ändå är säker att användas.

Material

Strängpressad aluminium, ändbeslag i plast och fästbeslag i stål (skruv o mutter).

Lagring

Lagra ramperna inomhus och håll dem rena. Lagra inte ramperna i temperaturer över 70°C då detta kan skada plastbeslagen.

Rekonditionering

Ramperna ska hållas rena från smuts och snö så att greppet i åkytan bibehålls. Ramperna kan rengöras med alla på marknaden kända rengöringsmedel och kan med fördel tvättas med högtryckstvätt vid behov.

Återvinning

Ramperna är återvinningsbara.



Separera metall från plast och lämna till närmaste återvinningsstation.

Vid skada eller tillbud

Vid skada eller tillbud ska detta omedelbart meddelas oss. Vid allvarligt tillbud ska detta också rapporteras till Läkemedelsverket. Om tillbudet inte är allvarligt men frekvent och ständigt återkommande ska även detta meddelas oss och rapporteras till Läkemedelsverket.

Teknisk information

Art nr	Längd min/max	Spår cm	Max belastning per par	Vikt per styck	Rekommenderad maximal höjd
U1	75/119 cm	19,5 cm	350 kg	3,8 kg	20 cm
U2	116/202 cm	19,5 cm	300 kg	5,9 kg	40 cm
U2/3	87/199 cm	18 cm	300 kg	5,9 kg	40 cm
U3	116/288 cm	18 cm	250 kg	8,5 kg	60 cm
V5	55/55 cm	21 cm	400 kg	1,5 kg	10 cm
V11	57/110 cm	21 cm	400 kg	3,6 kg	15 cm
V15	76/150 cm	21 cm	400 kg	4,7 kg	30 cm
V20	101/200 cm	21 cm	300 kg	6,0 kg	40 cm
V30	101/282 cm	19,5 cm	250 kg	8,5 kg	60 cm
E2	107/212 cm	26,5 cm	300 kg	7,8 kg	40 cm
E2/3	78/210 cm	25 cm	300 kg	8,3 kg	40 cm
E3	101/300 cm	25 cm	250 kg	11,1 kg	60 cm

Gäller samtliga modeller

Placera rampen med övre delen stabilt mot underlaget. Under den övre delen finns en halkskyddstejp på undersidan för att minska risken rampen lider mot underlaget. Var ändå försiktig och anpassa hastigheten när du kör upp på rampen så att detta sker på ett säkert sätt. Var också uppmärksam på om delar av rullstolens hjul hänger sig eller fastnar i rampen.

Avståndet mellan ramperna anpassas så att rullstolens hjul hamnar mitt på respektive ramp.

Vid transport/förflyttning ska ramperna alltid vara i sitt kortaste utförande. På teleskopramper ska låset alltid vara låst vid transport/förflyttning. Ramperna ska alltid bäras i sina handtag.


Skulle en skada uppstå på rampen får denna inte användas förrän skadan kontrollerad av fackman.

På varje ramp finns en dekal som anger med vilken maximal vikt som ramperna får belastas med. Maxlasten är angiven per styck. Ett par ramper kan alltså belastas med dubbla vikten, detta under förutsättning att vikten är jämnt fördelad.

Dekalen anger också vilken högsta rekommenderad nivåskillnad som ramperna är lämpliga för. Rekommendationen är en fingervisning och det är alltid de specifika förutsättningarna som avgör hur stor lutning man kan ha.



Ta det försiktigt, och använd ramperna med gott omdöme.

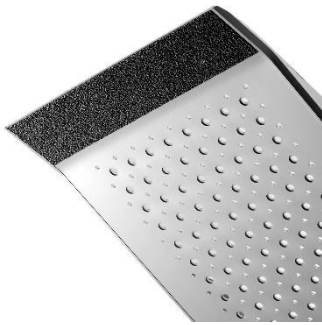

Topp



Lås teleskopisk del



Handtag

Specifika instruktioner beroende på modell

Teleskopiska ramper – U1, U2, U2/3, U3

Ställ ner rampen på marken. Öppna låset och dra sedan ut den teleskopiska delen maximalt. Placera enligt de allmänna instruktionerna ovan.

Var försiktig när du skjuter ihop ramperna igen så att du inte klämmer dig. Rampens lås ska alltid vara låst vid förflyttning eller transport.



OBSERVERA

Det är viktigt att rampen dras ut till sin fulla längd vid användning för bästa möjliga lutning!

Vikbara ramper – V11, V15, V20, E2

Fäll ut rampen med båda händerna och placera enligt de allmänna instruktionerna ovan. Var försiktig när du viker ihop ramperna, klämrisk! Bär rampen i båda handtagen för att hålla ihop de två delarna med varandra.

Vikbara & teleskopiska ramper – V30, E2/3, E3

Fäll ut rampen med båda händerna och placera enligt de allmänna instruktionerna ovan. Öppna låset på den teleskopiska delen och dra ut till maximal längd. Var försiktig när du skjuter ihop den teleskopiska delen och viker ihop rampen, klämrisk! Låset ska alltid vara låst vid transport/förflyttning. Bär rampen i båda handtagen för att hålla ihop de båda delarna.



OBSERVERA

Det är viktigt att rampen dras ut till sin fulla längd vid användning för bästa möjliga lutning!

Fasta ramper – V5

Placera ramperna enligt de allmänna instruktionerna ovan.